

GUIDA PER L'ESECUZIONE DI UN TAMPONE BUCCALE

Il test del DNA può essere eseguito con semplicità tramite un prelievo non invasivo. Con i tamponi buccali si potrà prelevare un campione di cellule epiteliali della mucosa buccale, introducendo il tampone cotonato secco (senza terreno di coltura) strofinando all'interno della bocca ed effettuando un'azione di brushing (sfregamento).



IMPORTANTE: Se il test viene effettuato su minori occorre avere la potestà genitoriale sui minori medesimi (in quanto verrebbero violate delle norme di legge) ed il consenso deve essere firmato da chi esercita la patria potestà.

Prima di effettuare il prelievo è assolutamente necessario rispettare i seguenti accorgimenti:

- **NON** mangiare e bere nei 60 minuti precedenti il prelievo;
- **NON** far uso di prodotti contenenti tabacco per almeno 60 minuti prima del prelievo;
- **NON** maneggiare i campioni di altri soggetti per evitare di contaminarli;
- Evitare che il tampone **si bagni**;
- È fondamentale aver **cessato l'assunzione di antibiotici** da almeno una settimana.

PRELIEVO CON TAMPONE BUCCALE. ISTRUZIONI PER L'USO.

1.

Dopo essersi lavati accuratamente le mani estrarre il tampone dalla confezione.

2.

Utilizzare il tampone come fosse uno "spazzolino da denti" sfregandolo energicamente sulle gengive e sulla superficie interna delle guance. Effettuare il prelievo con tutti i tamponi forniti.



3.

Reinserire il tampone all'interno della custodia che lo conteneva precedentemente, e porre il tutto nella busta biohazard fornita.



4.

Allegare ai campioni la scheda richiesta ben compilata e firmata con i vostri dati anagrafici.